

# GEBRAUCHSANWEISUNG

für .....

*KINDavero TRT*

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf von Tinnitus-Retraining-Instrumenten der Marke KIND entschieden haben. Diese Instrumente wurden individuell für Sie ausgewählt und von uns mit großer Sorgfalt an Ihr persönliches Hörprofil angepasst.

Wir haben Ihnen die Handhabung Ihrer Tinnitus-Retraining-Instrumente bereits umfassend erläutert. Diese Gebrauchsanweisung beschreibt die Funktionsweise Ihrer Instrumente noch einmal Punkt für Punkt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte auch dem **KIND Serviceheft**.

Selbstverständlich stehen wir Ihnen jederzeit gern zu allen Fragen rund um besseres Hören zur Verfügung und freuen uns auf Ihren Besuch.

Ihr KIND Hörgeräteakustiker

## Inhalt

Garantie .....	3
Allgemeine Sicherheitshinweise .....	4
<b>Funktion</b>	
Bedienelemente .....	6
Einsetzen der Tinnitus-Retraining- Instrumenten .....	6
Ein- und Ausschalten .....	6
Lautstärkeregelung .....	7
Batteriewechsel .....	7
Allgemeine Tipps zum Umgang mit Tinnitus .....	7
<b>Service</b>	
Reinigung und Pflege .....	8
Fehlerbehebung .....	8
Service .....	9

# Garantie

Name	FG-Nr.
Hörgeräte-Typ rechts	Nr.
Hörgeräte-Typ links	Nr.
Fernbedienung, Typ	Nr.
Garantie bis	

KIND bietet zusätzlich zu der gesetzlichen Gewährleistung eine einjährige Garantie (ab Kaufdatum) auf Hörgeräte, die in einem KIND Fachgeschäft in Deutschland, Österreich, Luxemburg oder der Schweiz gekauft wurden. Während der Garantiezeit werden Geräte, die aufgrund von Material- und Fabrikationsfehlern Defekte aufweisen, nach unserer Wahl repariert oder ersetzt. Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in unser Eigentum über. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit. Defekte Geräte sind in einem KIND Fachgeschäft im Land des Gerätekaufs auf Kosten des Käufers abzugeben und nach Erbringung der Garantieleistung abzuholen, das heißt Wege-, bzw. Versandkosten werden im Rahmen der Garantie nicht übernommen.

Garantieansprüche sind ausgeschlossen bei Schäden durch missbräuchliche oder unsachgemäße Behandlung, Umwelteinflüsse (Feuchtigkeit, Hitze, Staub), Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, Gewaltanwendung (z.B. Schlag, Stoß, Fall), eigenmächtige Reparaturversuche und Eingriffe durch nicht durch KIND Hörgeräte autorisierte Dritte. Von der Garantie ausgenommen sind auch Schäden an Verschleißteilen und Batterien.

# Allgemeine Sicherheitshinweise

- Schützen Sie Ihre Tinnitus-Retraining-Instrumente vor Nässe, Feuchtigkeit, Hitze und mechanischen Einwirkungen, z.B. starken Stößen. Legen Sie auch zur Vermeidung von Verunreinigungen vor der Benutzung von Haarspray Ihre Tinnitus Retraining Instrumente ab.
  - Bei Röntgenbestrahlungen oder in starken Magnet- oder Hochfrequenzfeldern (Beispiel: medizinische Geräte, Induktionsherde) können Ihre Tinnitus-Retraining-Instrumente in ihrer Funktion beeinträchtigt werden. Legen Sie Ihre Tinnitus-Retraining-Instrumente ggf. bitte zuvor in einem abgeschirmten Nebenraum ab.
  - Bei Verwendung von Mobiltelefonen oder Handfunkgeräten sowie im Bereich von Sendeanlagen kann es zu Störungen in Ihren Tinnitus-Retraining-Instrumenten kommen.
  - Benutzen Sie Ihre Tinnitus-Retraining-Instrumente bitte nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.
  - Wenn Sie Ihre Tinnitus-Retraining-Instrumente längere Zeit nicht tragen, so entnehmen Sie bitte die Batterien. Halten Sie die Batterien von Kindern und Haustieren fern und achten Sie darauf, dass keine Batterie verschluckt wird. Wenn Batterien verschluckt werden, suchen Sie sofort einen Arzt auf!
  - Die Batterien der Tinnitus-Retraining-Instrumente sind nicht aufladbar und dürfen nicht verbrannt werden.
  - Hörprogramme mit digitalen Richtmikrofonen reduzieren vor allem Hintergrundgeräusche.
  - Im Straßenverkehr können rückwärtige Warn- sowie Schallsignale von hinten herannahender Fahrzeuge unterdrückt werden.
  - Bei weiterführenden Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren KIND Hörgeräteakustiker.
  - Für weitere Wartungshinweise beachten Sie bitte das KIND Serviceheft.
  - Seien Sie sich bewusst, dass ein Tinnitus-Retraining-Instrument ohne Vorwarnung aussetzen kann. Denken Sie daran, wenn Sie auf Warnsignale achten müssen (z.B. im Straßenverkehr). Das Tinnitus-Retraining-Instrumente kann aussetzen, wenn z.B. die Batterie alt ist oder der Schallaustritt durch Feuchtigkeit oder Cerumen verstopft ist.
  - Betriebstemperatur: +1 °C bis +40 °C  
Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 93 %, nicht kondensierend
  - Transport- und Lagerbedingungen  
Temperatur und Luftfeuchtigkeit sollten die nachstehenden Grenzwerte über einen längeren Zeitraum bei Transport und Lagerung nicht überschreiten: Lagertemperatur: -25 °C bis +60 °C  
Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 93 %, nicht kondensierend
- 
- Unser von unabhängiger Stelle zertifiziertes Qualitätsmanagement-System garantiert Ihnen kontinuierlich hohe Produkt- und Dienstleistungsqualität.

## Symbole:




Deutet auf eine Situation hin, die zu Verletzungen führen kann oder/und einen ernsthaften Schaden an Ihrem Instrument hervorruft.



Wichtige Information, um den Umgang mit dem Tinnitus-Retraining-Instrument zu erleichtern.


# Bedienelemente

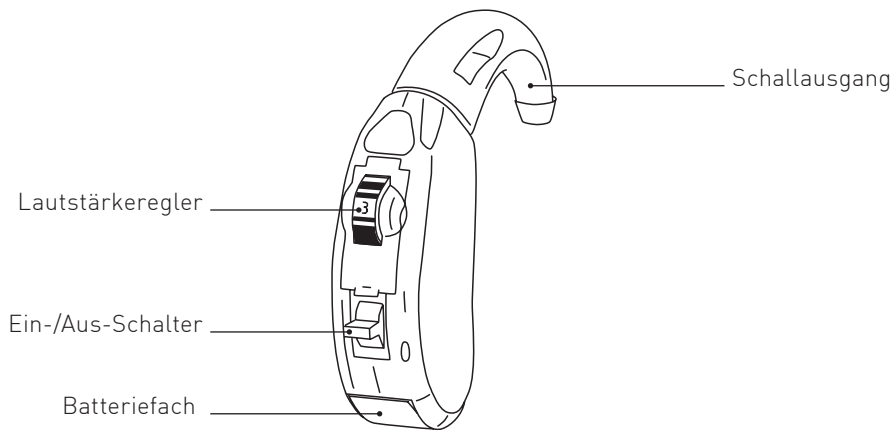

## Einsetzen der Tinnitus-Retraining-Instrumente

Setzen Sie das Ohrpassstück in Ihre rechte bzw. linke Ohrmuschel und platzieren Sie die Tinnitus-Instrumente hinter dem Ohr.

Achten Sie dabei bitte darauf, dass das Ohrpassstück optimal in der Ohrmuschel sitzt.

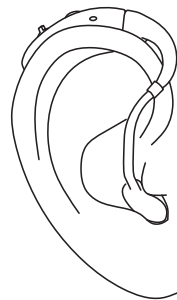

## Ein- und Ausschalten

### Schalterposition 1

Das Tinnitus-Retraining-Instrument ist eingeschaltet. Sie hören ein breitbandiges Rauschen.



### Schalterposition 0

Das Tinnitus-Retraining-Instrument ist ausgeschaltet.

## Lautstärkeregelung

Drehen Sie den Lautstärkereglernach oben, nimmt die Lautstärke zu. Drehen Sie ihn nach unten, wird das Geräusch leiser.




## Batteriewechsel

Für die Energieversorgung verwenden Sie bitte folgende Batterien:

KINDavero TRT ..... KIND ZL 3 (Größe 312)

Führen Sie den Batteriewechsel über einer weichen Unterlage aus. Entfernen Sie vor dem Einlegen die Schutzfolie von der „+“-Seite der neuen Batterie.

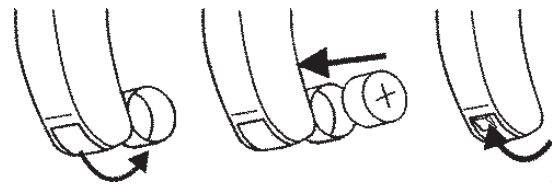

Das Batteriefach wird zum Wechseln der Batterie nach außen geschwenkt. Die Batterie ist korrekt eingesetzt, wenn das „+“-Zeichen auf der Batterie nach oben zeigt.

## Allgemeine Tipps zum Umgang mit Tinnitus

Setzen Sie sich möglichst wenig Stress und keiner zu starken akustischen Belastung aus. Akustische Reize (zum Beispiel leise rhythmische Musik) können genutzt werden, um vom Tinnitus abzulenken und sich nicht auf das Ohrgeräusch zu konzentrieren. Absolute Stille führt leicht zur Konzentration auf das Ohrgeräusch und verstärkt es subjektiv. Versuchen Sie zu vermeiden, das gesamte Denken und Fühlen auf das Ohrgeräusch zu fokussieren.

# Reinigung und Pflege

Die regelmäßige Reinigung und Pflege der Tinnitus-Retraining-Instrumente verlängert die Lebensdauer bzw. senkt die Reparaturanfälligkeit entscheidend. Bei Ihrem KIND Hörgeräteakustiker erhalten Sie das speziell auf Ihre Tinnitus-Retraining-Instrumente abgestimmte Reinigungs- und Pflegemittelprogramm der Serie **KINDotoClean**.

**i** Schützen Sie Ihre Tinnitus-Retraining-Instrumente vor Feuchtigkeit (z.B. Duschen, Schweiß) und nehmen Sie auch vor der Benutzung von Haarspray Ihre Tinnitus-Retraining-Instrumente ab. Zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden empfehlen wir unsere elektronischen **KINDotoClean** Trockensysteme.



## Fehlerbehebung

Tinnitus-Retraining-Instrumente von KIND sind sehr zuverlässig. Sollte dennoch ein Problem auftreten, kann es in der Regel schnell gelöst werden.

Wenn Sie nach Durchführung dieser Lösungsvorschläge weiterhin Probleme mit Ihren Tinnitus-Retraining-Instrumenten haben, wenden Sie sich bitte an Ihren KIND Hörgeräteakustiker.

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Das Rauschen ist zu leise.	Lautstärkeregler zu leise eingestellt. Schallschlauch ist verschmutzt. Batterie schwach.	Lautstärke erhöhen. Schallschlauch reinigen. Batterie prüfen, ggf. ersetzen.
Kein Rauschen hörbar.	Lautstärkeregler zu leise eingestellt. Schallaustritt ist verstopft. Batterie ist erschöpft. Instrument ist ausgeschaltet.	Lautstärke erhöhen. Schallschlauch reinigen. Batterie ersetzen. Instrument einschalten.
Das Rauschen ist zu laut.	Lautstärkeregler ist falsch eingestellt.	Lautstärke passend einstellen.
Das Rauschen klingt zu hell oder zu tief.	Tonblende falsch eingestellt.	Bitte wenden Sie sich an Ihren KIND Hörgeräteakustiker.

# Service

Tinnitus-Retraining-Instrumente sind täglich viele Stunden im Einsatz. Um die einwandfreie Funktion Ihrer Tinnitus-Retraining-Instrumente sicherzustellen, empfehlen wir Ihnen, alle drei Monate Ihre Tinnitus-Retraining-Instrumente durch Ihren KIND Hörgeräteakustiker überprüfen zu lassen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte Ihrem **KIND Serviceheft**.

Auch Ihr Gehör sollte regelmäßig überprüft werden, damit Ihre neuen Hörgeräte immer über die optimale Programmierung verfügen – für bestmögliche Hörqualität in jeder Situation.

Wir wünschen Ihnen für viele Jahre Freude an Ihren Tinnitus-Retraining-Instrumenten von KIND.



Hörtest

Hörberatung

Hörschutz

Hörgeräte

07/2021



**Deutschland:**

KIND GmbH & Co. KG  
Kokenhorststraße 3-5  
30938 Großburgwedel/Hannover  
Tel. 0800 6 999 333  
Fax 05139 8085-299  
info@kind.com

**Schweiz:**

KIND Hörzentralen  
Hertensteinstrasse 8  
6004 Luzern  
Tel. 04141 87070  
Fax 04141 87071  
info.ch@kind.com

**Österreich:**

KIND Optik Ges.m.b.H.  
Elterleinplatz 15  
1170 Wien  
Tel. 01 4031844  
Fax 01 4031857  
info.at@kind.com

Ihr KIND Fachgeschäft