

# GEBRAUCHSANWEISUNG

für .....

○ *KINDsurfLink TV 2.4*

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

der *KINDsurfLink TV 2.4* dient dazu, Audioinhalte von elektronischen Audioquellen direkt auf Ihr drahtloses 2,4 GHz-Hörsystem zu übertragen. Der *KINDsurfLink TV 2.4* lässt sich mit vielen elektronischen Audioquellen verbinden, unter anderem mit Fernsehern, Computern, MP3-Playern, DVD-Playern und Kabelboxen.

Der *KINDsurfLink TV 2.4* kann Audioinhalte an eine unbegrenzte Anzahl an Benutzern gleichzeitig übertragen, damit alle Personen ein und dasselbe Hörerlebnis genießen können.

### Streaming:

Der Audioinhalt bzw. Ton wird drahtlos von der *KINDsurfLink TV 2.4* direkt auf Ihr Hörsystem übertragen.

Selbstverständlich stehen wir Ihnen jederzeit gern zu allen Fragen rund um besseres Hören zur Verfügung und freuen uns auf Ihren Besuch.

Ihr KIND Hörakustiker

## Inhalt

Garantie .....3

### **Funktion**

Einrichtung .....4

Überblick .....4

Grundlegende Verwendung .....6

Mit Audioquellen verbinden .....8

Koppeln .....8

Audio-Streaming starten/anhalten .....9

Das Netzteil entfernen ..... 10

### **Service**

Fehlerbehebung ..... 10

Sicherheitshinweise ..... 12

Technische Beschreibung der

Drahtlosfunktion ..... 13

Gesetzliche Vorschriften ..... 14


# Garantie

Name	FG-Nr.
Hörsystem-Typ rechts	Nr.
Hörsystem-Typ links	Nr.
Fernbedienung, Typ	Nr.
Garantie bis	

KIND bietet zusätzlich zu der gesetzlichen Gewährleistung eine einjährige Garantie (ab Kaufdatum) auf *KINDsurfLink* Zubehör, das in einem KIND Fachgeschäft in Deutschland, Österreich, Luxemburg oder der Schweiz gekauft wurden. Während der Garantiezeit wird *KINDsurfLink* Zubehör, das aufgrund von Material- und Fabrikationsfehlern Defekte aufweisen, nach unserer Wahl repariert oder ersetzt. Ausgetauschtes *KINDsurfLink* Zubehör oder Teile gehen in unser Eigentum über. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit. Defektes *KINDsurfLink* Zubehör ist in einem KIND Fachgeschäft im Land des Kaufs auf Kosten des Käufers abzugeben und nach Erbringung der Garantieleistung abzuholen, das heißt Wege- bzw. Versandkosten werden im Rahmen der Garantie nicht übernommen.


Garantieansprüche sind ausgeschlossen bei Schäden durch missbräuchliche oder unsachgemäße Behandlung, Umwelteinflüsse (Feuchtigkeit, Hitze, Staub), Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, Gewaltanwendung (z. B. Schlag, Stoß, Fall), eigenmächtige Reparaturversuche und Eingriffe durch nicht durch KIND Hörgeräte autorisierte Dritte. Von der Garantie ausgenommen sind auch Schäden an Verschleißteilen und Batterien.

# Einrichtung

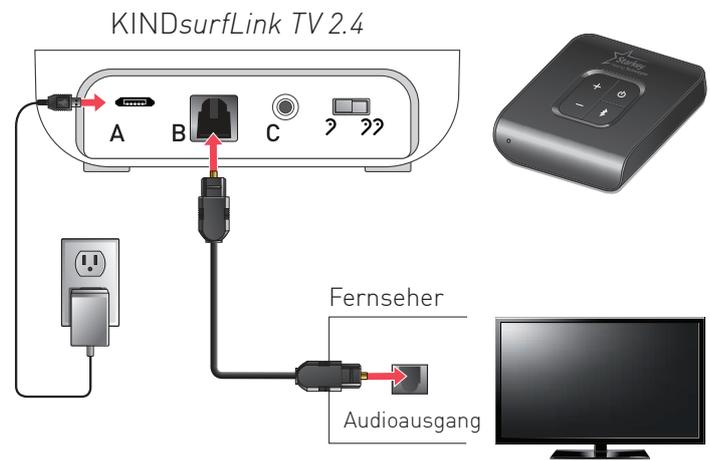

# Überblick

- 1 Stromanschluss (Eingang A):  
Ein Netzteil ist im Lieferumfang enthalten.
- 2 Optischer TOSLINK-Eingang (Eingang B):  
Ein TOSLINK-Kabel ist im Lieferumfang enthalten.
- 3 Analog-Eingang (Eingang C):  
Ein 3,5 mm/RCA-Kabel ist im Lieferumfang enthalten.
- 4 Mono/Stereo-Taste:  
? (MONO) – Wählen Sie diese Option aus,  
wenn Sie ein Hörsystem tragen.  
?? (STEREO) – Wählen Sie diese Option aus,  
wenn Sie zwei Hörsysteme tragen.

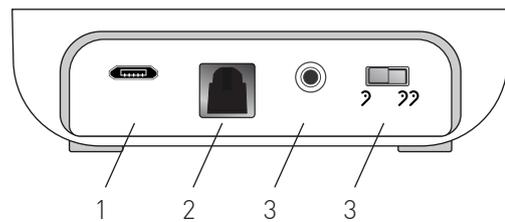

## Verpackungsinhalt

- KINDsurfLink TV 2.4
- Netzteil
- Optisches TOSLINK-Kabel
- 3,5 mm/RCA-Kabel
- Bedienungsanleitung

# Überblick

⏻ : TV – AN und AUS

🔗 : Mit Hörsystemen koppeln

+ und – : Drücken Sie zum Erhöhen der Lautstärke des übertragenen Audioinhalts auf „+“ und zum Senken der Lautstärke auf „–“.

LED: zeigt hilfreiche Informationen zur TV an.

## LED

## Betriebszustand

---

Aus	Gerät ist aus.
Grün (nicht blinkend)	Gerät ist an, aber es werden keine Audioinhalte übertragen.
Blau (nicht blinkend)	Gerät ist an und es werden Audioinhalte übertragen.
Blau (blinkend)	Der Hörsystem-Koppelungsmodus ist aktiv. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Koppeln“ auf Seite XX.

---


## Hinweis

Die Lautstärke des übertragenen Inhalts kann auch über die *KINDiLink 2* App, die *KINDsurfLink Fernbedienung 2.4* und/oder Hörsystem-Bedienelemente eingestellt werden. Ausführliche Informationen zur Einrichtung Ihres Systems finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Hörsystem. Alternativ können Sie auch Ihren KIND Hörakustiker kontaktieren.


# Grundlegende Verwendung

So können Sie Ihren KINDsurfLink TV 2.4 schnell einrichten und benutzen:

Nehmen Sie an beiden Enden des TOSLINK-Kabels die Kunststoffabdeckung ab.

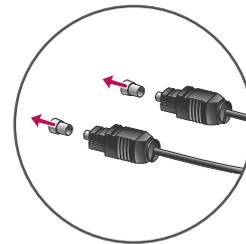


Stecken Sie ein TOSLINK-Kabel in den Audioausgang an Ihrer elektronischen Audioquelle ein. Schalten Sie Ihre elektronische Audioquelle ein.

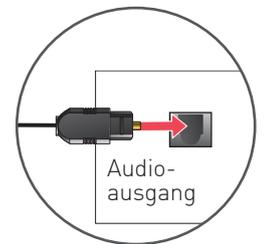

2


**Hinweis:** Wenn Sie keinen TOSLINK-Audioausgang finden können, verwenden Sie eine andere elektronische Audioquelle oder das 3,5 mm/RCA-Kabel.

Stecken Sie das andere Ende des TOSLINK-Kabels an der Hinterseite der KINDsurfLink TV 2.4 ein (Eingang B).

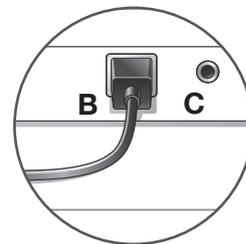


Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose.


**Hinweis:** Wenn das Netzteil nicht mit dem richtigen Stecker ausgestattet ist, lesen Sie bitte Abschnitt „Netzteil entfernen“.

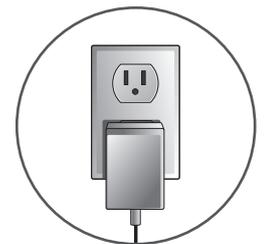

Stecken Sie den Micro-USB-Anschluss des Netzteils an der Rückseite des KINDsurfLink TV 2.4 ein (Eingang A).

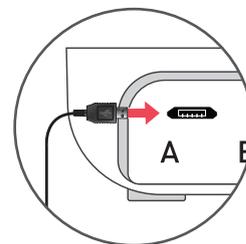


Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste an dem KINDsurfLink TV 2.4, um ihn einzuschalten.

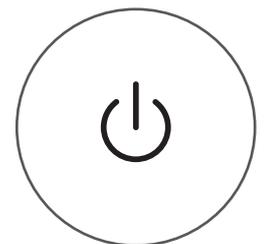

Wenn die LED an der Vorderseite blau leuchtet, hat der KINDsurfLink TV 2.4 Audioinhalte erkannt und überträgt diese.


## Hinweis

Wenn die LED weiterhin grün leuchtet, überprüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß eingerichtet ist, oder lesen Sie den Abschnitt „Fehlerbehebung“.

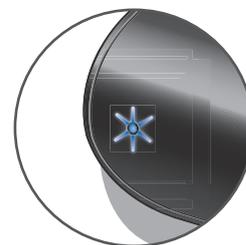

Stellen Sie sicher, dass Ihre Hörsysteme eingeschaltet sind.

**Hinweis:** Bevor Sie zum ersten Mal Audioinhalte übertragen, müssen Sie Ihre Hörsysteme mit der TV koppeln. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Koppeln“.

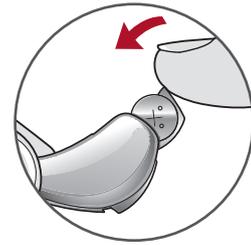

So starten Sie die Übertragung von Audioinhalten:  
Öffnen Sie die *KINDiLink 2* App und wählen Sie die Option „Streaming von TV-Gerät starten“ aus.  
Weitere Optionen finden Sie im Abschnitt „Audio-Streaming starten/anhalten“.

Drücken Sie auf die „+/-“-Taste an ihrem *KINDsurfLink TV 2.4*, um die Lautstärke einzustellen.






So halten Sie die Übertragung an:  
Öffnen Sie die *KINDiLink 2* App und wählen Sie die Option „Streaming von TV-Gerät anhalten“ aus.  
Schalten Sie ihre *KINDsurfLink TV 2.4* aus (⏻).  
Weitere Optionen finden Sie im Abschnitt „Audio-Streaming starten/anhalten“.

## Mit Audioquellen verbinden

Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Audioquelle an den *KINDsurfLink TV 2.4* anzuschließen. Prüfen Sie, welche Audioausgänge an Ihrer elektronischen Audioquelle vorhanden sind.

### Hinweis

Bei der Ersteinrichtung leuchtet die LED blau und bestätigt so, dass das Audiokabel ordnungsgemäß an den *KINDsurfLink TV 2.4* eingesteckt und das Audio-Streaming aktiv ist.

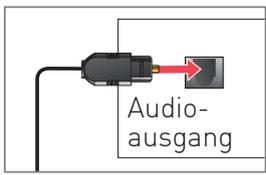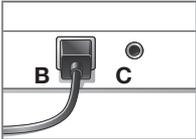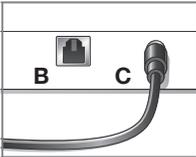		Stecken Sie das Kabel in den Audioausgang an Ihrer elektronischen Audioquelle ein.	Stecken Sie das andere Ende des Kabels an der Hinterseite des <i>KINDsurfLink TV 2.4</i> ein.
Optisches TOSLINK-Kabel			Verwenden Sie Eingang B. 
Analoges RCA/3,5 mm-Kabel		<b>Hinweis:</b> Stecken Sie den weißen Stecker in den weißen Ausgang und den roten Stecker in den roten Ausgang ein.	Verwenden Sie Eingang C. 

## Koppeln

Damit der *KINDsurfLink TV 2.4* mit Ihren Hörsystemen interagieren kann, müssen Sie den *KINDsurfLink TV 2.4* zunächst mit den entsprechenden Hörsystemen koppeln. Diesen Vorgang müssen Sie nur einmal durchführen. Anschließend sollten sich die Geräte automatisch erkennen, wenn sie eingeschaltet sind und sich innerhalb der Drahtlosreichweite befinden.\*

So koppeln Sie den *KINDsurfLink TV 2.4* mit Ihren Hörsystemen:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Hörsysteme nicht mit Bluetooth-Geräten in der Nähe verbunden sind. Gehen Sie wie folgt vor:  
  
Deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Smartphone.  
  
Schalten Sie alle TVs sowie alle Zubehör-Produkte aus, die bereits mit Ihren Hörsystemen gekoppelt sind.
2. Schalten Sie Ihre Hörsysteme aus und anschließend wieder ein.
3. Platzieren Sie Ihre Hörsysteme in einem Abstand von etwa 15 cm zum *KINDsurfLink TV 2.4*.

\* Die Reichweite beträgt üblicherweise bis zu 10 Meter. Die Reichweite kann unter bestimmten Umständen geringer ausfallen, zum Beispiel aufgrund von Hindernissen, Störungen und der Position des Hörers. Auch eine größere Reichweite ist möglich, wobei eine Verschlechterung der Audio- und Verbindungsqualität nicht ausgeschlossen werden kann.

4. Drücken Sie auf die **X**-Taste an Ihrem **KINDsurfLink TV 2.4**. Die LED an der Vorderseite blinkt blau. Während dieses Vorgangs wird das Audio-Streaming vorübergehend angehalten.

#### 5. Bei zwei Hörsystemen:

Erstes LED-Blinken	Zweites LED-Blinken	Koppelungsergebnis	Nächster Schritt
1 Grün	2 Grün	Beide Hörsysteme sind gekoppelt.	Abgeschlossen
1 Grün	2 Rot	Nur ein Hörsystem ist gekoppelt.	Wiederholen Sie die Schritte 1–5.
1 Rot	N/A	Keines der Hörsysteme ist gekoppelt.	Wiederholen Sie die Schritte 1–5.

#### 6. Bei einem Hörsystem:


LED-Anzeige	Koppelungsergebnis	Nächster Schritt
1 Grün	Erfolgreich	Abgeschlossen
1 Rot	Nicht erfolgreich	Wiederholen Sie die Schritte 1–4 und 6.

## Audio-Streaming starten/anhalten

Für das Starten (und Anhalten) des Audio-Streamings über den **KINDsurfLink TV 2.4** stehen Ihnen mehrere Optionen zur Auswahl.

**„Start/Stoppen Sie die Audioübertragung“ unter **KINDiLink 2 App**:** Öffnen Sie die App auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Tippen Sie im Menü Zubehör auf „Play“ bzw. „Stop“

**KINDsurfLink Fernbedienung 2.4:** Drücken Sie auf die Favoritentaste, wenn dies von Ihrem KIND Hörakustiker so konfiguriert wurde.

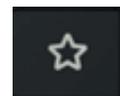


**Hörsystem-Bedienelement:** Sie können das Streaming mithilfe einer bestimmten Tastenkombination (z. B. durch langes Drücken einer Taste) starten/anhalten, wenn dies von Ihrem KIND Hörakustiker so konfiguriert wurde.

Das Audio-Streaming wird auch angehalten, wenn ein eingehendes Audiosignal ermittelt werden kann bzw. der **KINDsurfLink TV 2.4** ausgeschaltet wird. Möglicherweise hören Sie einen bestimmten Ton in Ihrem Hörsystem, der Sie darauf hinweist, dass das Audio-Streaming gestartet/angehalten wurde.


## Das Netzteil entfernen

Damit der *KINDsurfLink TV 2.4* in mehreren Ländern genutzt werden kann, wird er mit verschiedenen Steckern geliefert. Wenn das Netzteil zusammengebaut werden muss:


Wählen Sie den Stecker aus, der für Ihr Land erforderlich ist.

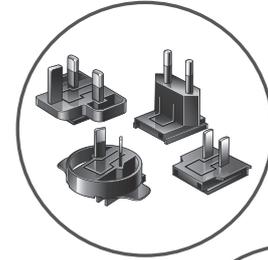

Schieben Sie den Stecker auf dem Netzteil nach unten, bis er einrastet.

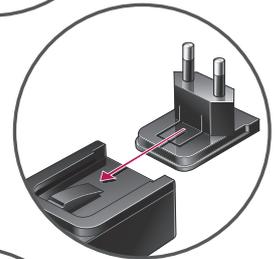

Drücken Sie zum Entfernen des Steckers auf die Einkerbung und schieben Sie ihn vom Kabel weg.

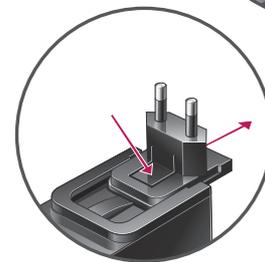

## Fehlerbehebung

Symptom	Mögliche Ursachen	Lösungen
Ein Hörsystem bzw. beide Hörsysteme übertragen plötzlich keine Audioinhalte mehr.	Möglicherweise befinden sich die Hörsysteme außerhalb der Reichweite.	Verringern Sie den Abstand zum <i>KINDsurfLink TV 2.4</i> .
	Das Audio-Streaming funktioniert nicht mehr, weil die Batterie im Hörsystem leer ist.	Setzen Sie eine neue Batterie in das Hörsystem ein bzw. laden Sie Ihr Hörsystem bei Bedarf auf.
	Möglicherweise wird das Signal durch einen großen Gegenstand, zum Beispiel ein Möbelstück oder eine Wand, verschlechtert.	Damit Sie von höchster Leistung profitieren, sollten sich Ihre Hörsysteme in Sichtlinie zum <i>KINDsurfLink TV 2.4</i> befinden.

# Fehlerbehebung

Symptom	Mögliche Ursachen	Lösungen
Die LED leuchtet blau, aber die Hörsysteme geben keinen Ton aus.	Die Hörsysteme befinden sich außerhalb der Drahtlosreichweite.	Verringern Sie den Abstand zum <i>KINDsurfLink TV 2.4</i> .
	Das Audio-Streaming muss manuell gestartet werden, damit die Hörsysteme Ton ausgeben.	Starten Sie das Audio-Streaming über Ihre <i>KINDiLink 2 App</i> , Ihre <i>KINDsurfLink Fernbedienung 2.4</i> oder Ihr Hörsystem-Bedienelement manuell.
	Die Hörsysteme sind nicht mit dem <i>KINDsurfLink TV 2.4</i> gekoppelt.	Weitere Informationen zum Verbinden Ihrer Hörsysteme mit Ihrem <i>KINDsurfLink TV 2.4</i> finden Sie im Abschnitt „Koppeln“.
Ich warte darauf, übertragene Audioinhalte zu hören, aber meine LED leuchtet grün.	Möglicherweise ist das Audiokabel am Audioeingang der elektronischen Audioquelle angeschlossen.	Stellen Sie sicher, dass das Kabel am Audioausgang der elektronischen Audioquelle angeschlossen ist.
	Es ist kein eingehendes Audiosignal vorhanden.	Schalten Sie die elektronische Audioquelle ein.
	Der von der elektronischen Audioquelle ausgegebene Inhalt hat nicht das richtige Format.	Stellen Sie den Digitalausgang auf Ihrer elektronischen Audioquelle auf PCM oder Dolby Audio.
Die LED leuchtet rot.	Möglicherweise liegt ein Fehler vor.	Ziehen Sie das Netzteil aus Eingang A ab, warten Sie fünf Sekunden lang und stecken Sie das Netzteil wieder ein.
Der übertragene Audioinhalt wird nicht synchron zum Fernsehbild ausgegeben.	Viele neue Fernsehgeräte (zum Beispiel HD-Fernsehgeräte) benötigen zur Verarbeitung des Videosignals viel Zeit, wodurch die Ton/Bild-Synchronisierung beeinträchtigt werden kann.	Verwenden Sie einen anderen Audioausgang an Ihrem Fernseher (hierfür benötigen Sie möglicherweise ein anderes Kabel).
		Verwenden Sie eine andere elektr. Audioquelle. Wenn Sie zum Beispiel momentan eine Kabeldose verwenden, nehmen Sie den Audioausgang des Fernsehers oder andersherum.
		Einige elektronische Audioquellen (wie Fernseher oder A/V-Receiver) verfügen zum Ton/Bild-Abgleich über eine integrierte Option.

# Sicherheitshinweise

## Verwendungszweck

Der *KINDsurfLink TV 2.4* ist ein Übertragungssystem für drahtlose Luftleitungshörsysteme. Es übermittelt Ton von Fernsehgeräten oder anderen elektronischen Audioquellen per Drahtlosverbindung direkt an Luftleitungshörsysteme.

Der *KINDsurfLink TV 2.4* erfüllt die strengsten internationalen gesetzlichen Auflagen über die Störfestigkeit. Trotzdem besteht die Möglichkeit, dass aufgrund von Störungen im Stromversorgungsnetz, elektromagnetischen Feldern anderer medizinischer Geräte, Funksignalen und elektrostatischen Entladungen Störungen auftreten.

Zur Reinigung des *KINDsurfLink TV 2.4* können die *KINDotoClean* Pflegemittel verwendet werden..

Wenn Sie andere medizinische Geräte verwenden oder implantierbare medizinische Geräte tragen, zum Beispiel Defibrillatoren oder Schrittmacher, und Sie befürchten, dass Ihr *KINDsurfLink TV 2.4* womöglich Störungen Ihres medizinischen Geräts hervorrufen könnte, kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt oder den Hersteller Ihres medizinischen Geräts und holen Sie dort Informationen über die Störungsrisiken ein.

Der *KINDsurfLink TV 2.4* sollte bei einer Temperatur von  $-40\text{ °C}$  bis  $+60\text{ °C}$  und einer relativen Feuchtigkeit von 10 bis 95 % aufbewahrt werden.

Der *KINDsurfLink TV 2.4* dient der Verwendung in geschützten Räumen in einem Temperaturbereich von  $0\text{ °C}$  bis  $40\text{ °C}$ .



**Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, folgende Warnhinweise aufzuführen:**

**Der *KINDsurfLink TV 2.4* sollte nicht direkt neben einem anderen elektronischen Gerät eingesetzt werden, um eine fehlerhafte Geräteleistung zu vermeiden. Falls eine solche Verwendung erforderlich ist, müssen Sie überprüfen, ob Ihre Hör- und anderen Geräte normal funktionieren.**

**Die Verwendung von Zubehör, Komponenten oder Ersatzteilen, die nicht vom Hersteller Ihres *KINDsurfLink TV 2.4* zur Verfügung gestellt wurden, kann zu einer Steigerung der elektromagnetischen Emissionen, einer Verringerung der elektromagnetischen Störfestigkeit sowie einem Leistungsabfall führen.**

**Wenn tragbare Funkfrequenzgeräte in einem Abstand von weniger als 30 cm zu Ihrem *KINDsurfLink TV 2.4* eingesetzt werden, kann es zu einem Leistungsabfall Ihres Hörsystems kommen. Wenn dies der Fall ist, entfernen Sie sich vom entsprechenden Hochfrequenzgerät.**

Obwohl der *KINDsurfLink TV 2.4* über keine formale Zertifizierung (IP-Klasse) für den Schutz vor Staub oder Wasser gemäß IEC 60529 verfügt, wurde es für die Schutzklasse IP 5X getestet. Das bedeutet, dass der *KINDsurfLink TV 2.4* staubgeschützt ist.

Der *KINDsurfLink TV 2.4* enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Das Gerät darf nicht geöffnet oder modifiziert werden.

Schließen Sie den *KINDsurfLink TV 2.4* nicht an Geräte an, die in dieser Bedienungsanleitung nicht erwähnt werden. Die erwartete Nutzungsdauer des *KINDsurfLink TV 2.4* beträgt fünf Jahre.

## Technische Beschreibung der Drahtlosfunktion

Der *KINDsurfLink TV 2.4* kommuniziert im Frequenzband von 2,4 bis 2,4835 GHz und sendet dabei einen effektiven Leistungspegel von maximal 21 dBm (Nordamerika) bzw. 10 dBm (alle anderen Regionen) mit GFSK-Modulation und einer Bandbreite von 2 MHz aus. Die Receiverfunktfrquenz hat eine Bandbreite von 2 MHz.

Der *KINDsurfLink TV 2.4* wurde entsprechend der folgenden Emissions- und Störfestigkeitsprüfungen getestet und hat diese bestanden:

- IEC 60601-1-2 Anforderungen an ausgesendete und weitergeleitete Emissionen für ein Gerät der Gruppe 1, Klasse B, gemäß CISPR 11.
- Harmonische Verzerrung und Spannungsschwankungen, die die Eingangsleistungsquelle beeinträchtigen, wie in IEC 60601-1-2 Tabelle 2 beschrieben.
- Störfestigkeit gegen ausgesendete Funkfrequenz bei einer Feldstärke von 10 V/m zwischen 80 MHz und 2,7 GHz sowie höheren Bandbreiten von Kommunikationsgeräten, wie in IEC 60601-1-2 Tabelle 9 beschrieben.
- Störfestigkeit gegen Magnetfelder mit energietechnischer Frequenz bei einer Feldebene von 30 A/m.
- Störfestigkeit gegen elektrostatische Entladungen von +/- 8 kV und Luftentladungen von +/- 15 kV.
- Störfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische Störgrößen im Leistungseingang in der Stärke von +/- 2 kV bei einer Folgefrequenz von 100 Hz.
- Störfestigkeit gegen Stoßspannungen in der Stärke von +/- 1 kV.
- Störfestigkeit gegen von Funkfrequenzbändern verursachten weitergeleiteten Störungen der Eingangsleistung, wie in IEC 60601-1-2 Tabelle 6 aufgeführt.
- Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche und Störungen der Eingangsleistung, wie in IEC 60601-1-2 Tabelle 6 aufgeführt.

# Gesetzliche Vorschriften

FCC-ID: EOA-24TV

IC: 6903A-24TV (Modelle 800 und 801)

## FCC/IC-Vorschrift

Dieses Gerät erfüllt die Vorgaben von Teil 15 der Vorschriften der US-amerikanischen Federal Communications Commission (FCC) und die lizenzfreien Normen über die Funkstandardspezifikationen (RSS) der Industry Canada. Die Funktionsweise unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen annehmen, einschließlich Störungen, die eine unerwünschte Funktionsweise des Geräts verursachen. Benutzer werden darauf hingewiesen, dass ein Mindestabstand von 20 cm zum Gerät eingehalten werden muss, um die Anforderungen an die Aussetzung gegenüber Funkfrequenz der FCC und ISED Canada zu erfüllen.

**HINWEIS: Der Hersteller ist für keinerlei Funk- oder Bildstörungen verantwortlich, die von nicht autorisierten an diesem Gerät vorgenommenen Modifikationen hervorgerufen werden. Solche Modifikationen können die Berechtigung des Benutzers über die Geräteverwendung aufheben.**

Starkey Hearing Technologies erklärt hiermit, dass der *KINDsurfLink TV 2.4* die wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Eine Kopie der Konformitätserklärung ist unter folgender Adresse und auf [docs.starkeyhearingtechnologies.com](http://docs.starkeyhearingtechnologies.com) erhältlich.



Starkey Hearing Technologies  
6700 Washington Ave. South  
Eden Prairie, MN 55344 USA

Starkey Laboratories (Germany) G.m.b.H  
Weg beim Jäger 218-222  
22335 Hamburg  
Germany

Hergestellt für:  
KIND GmbH & Co. KG  
Kokenhorststraße 3-5  
30938 Großburgwedel/Hannover  
[www.kind.com](http://www.kind.com)

## Symbole:



Deutet auf eine Situation hin, die zu Verletzungen führen kann oder/und einen ernsthaften Schaden an Ihrem Gerät hervorruft.



Wichtige Information, um den Umgang mit dem Gerät zu erleichtern.



Dieser *KINDsurfLink TV 2.4* erzeugt Funkfrequenzenergie. In der Nähe von Geräten, die mit nebenstehendem Symbol versehen sind, können Störungen auftreten.



Gerät der Klasse 2



Bedienungsanleitung ansehen



Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Symbol mit zwei D sind Handelsmarken von Dolby Laboratories.



**Deutschland:**

KIND GmbH & Co. KG  
Kokenhorststraße 3–5  
30938 Großburgwedel/Hannover  
Tel. 0800 6 999 333  
Fax 05139 8085-299  
info@kind.com

**Schweiz:**

KIND Hörzentralen  
Hertensteinstrasse 8  
6004 Luzern  
Tel. 04141 87070  
Fax 04141 87071  
info.ch@kind.com

**Österreich:**

KIND Optik Ges.m.b.H.  
Elterleinplatz 15  
1170 Wien  
Tel. 01 4031844  
Fax 01 4031857  
info.at@kind.com

Ihr KIND Fachgeschäft